

NORMISON® ušní sprej

Zdravotnický prostředek

Co je NORMISON ušní sprej?

NORMISON ušní sprej slouží k preventivní a doprovodné terapii při zánětech zevního zvukovodu, zejména při častějším a déle trvajícím pobytu ve vodě.

Co je obsaženo v NORMISON ušní sprej?

NORMISON ušní sprej obsahuje izopropylalkohol, vodu, kyselinu octovou a dexpanthenol.

Jak NORMISON ušní sprej funguje?

Příliš vysoká vlhkost a příliš vysoká alkalická hodnota pH podporuje vznik zánětu zevního zvukovodu. Zejména po intenzivním kontaktu s vodou je proto odstranění vlhkosti důležitým opatřením k zabránění zánětů. Unikátní složení NORMISON ušního spreje zajišťuje, aby se kožní povrch zevního zvukovodu rychle usušil. Obsažené kyselé komponenty napomáhají rychlé regeneraci a udržení přirozeně kyselého ochranného povrchu kůže. Obsažený dexpanthenol poskytuje kůži ještě další, speciální ochranu navíc.

Oblasti použití – kdy byste měli použít NORMISON ušní sprej?

- K prevenci zánětů zevního zvukovodu, zejména při častějším nebo déle trvajícím pobytu ve vodě, jako např. po plavání, koupání, potápění, vodních sportech.
- Jako doprovodná terapie v rámci medikamentosního léčení zánětů zevního zvukovodu.

Používání během těhotenství a kojení neprovázejí žádné pochybnosti.

NORMISON ušní sprej je určen pro použití dospělými osobami a dětmi od 3 let věku.

Dávkování a způsob aplikace – jak byste měli NORMISON ušní sprej aplikovat?

Po pobytu ve vodě (sladké nebo slané) doporučujeme nastříkat do zvukovodu: U dospělých 2-3 stříky, u dětí 1-2 stříky. Poté skloňte hlavu ke straně a nechte nastříkanou tekutinu v uchu působit po 20-30 sekund. Po opětovném narovnání hlavy setřete vytékající tekutinu a zbylou tekutinu zůstávající ve zvukovodu nechte vsřebat. Celý proces opakujte i ve druhém uchu.

NORMISON ušní sprej má mít před použitím pokud možno tělesnou teplotu.

Při silně olupujícím ušním mazu, kožních lupech anebo jiných usazeninách doporučujeme před použitím NORMISON ušního spreje nejprve vyčistit zevní zvukovod s CERUSTOP ušním olejem.

Kdy se nesmí NORMISON ušní sprej používat?

- Jste-li precitlivělí (alergičtí) na některou látku obsaženou v přípravku.
- Při perforované bubínekové bláně (otvor v bubínku).

Možné vedlejší účinky/interakce

NORMISON ušní sprej může při lehce podrážděném zevním zvukovodu vyvolat pocit pálení. Studie interakcí s jinými produkty nebyly provedeny.

Informace pro bezpečné použití

NORMISON ušní sprej je zdravotnický prostředek. Při ušních bolestech musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc!

Zvukovody nesmíte mechanicky čistit, ani je ucpávat vatou!

NORMISON ušní sprej se nesmí užívat vnitřně, ani stříkat do očí!

Lahvička musí být stále uzavřená a uchováвана mimo dosah dětí!

Velikost balení: 10 ml lahvička s rozstříkovačem. 1 vstříkovaná dávka = 0,1 ml.

Doba použitelnosti: viz datum použitelnosti uvedené na obalu. Po prvním otevření lahvičky přípravku nepoužívejte déle než 8 týdnů.

Pokyny pro skladování: Neskladovat při teplotě nad 25 °C. Vyžaduje ochranu proti světlu.

Výrobce: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystrasse 129, 1200 Vídeň, Rakousko

Distributor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Vídeň, Rakousko

Distributor v České republice: Agency MM Health s.r.o., U vily 463, 691 05 Zaječí



Stav informací: březen 2021

Použité symboly:

Dodržujte návod k použití!

Výrobce

Šarže

Spotřebujte před

Neskladovat při teplotě nad 25 °C

Chraňte před světlem

NORMISON® ušný sprej

Zdravotnícka pomôcka

Čo je NORMISON ušný sprej?

NORMISON ušný sprej slúži na preventívnu a podpornú terapiu pri zápaloch vonkajšieho zvukovodu, najmä pri častejšom a dlhšie trvajúcim pobyte vo vode.

Čo obsahuje NORMISON ušný sprej?

NORMISON ušný sprej obsahuje izopropylalkohol, vodu, kyselinu octovú a dexpanthenol.

Akú funkciu má NORMISON ušný sprej?

Příliš vysoká vlhkost a příliš vysoká alkalická hodnota pH podporuje vznik zápalu vonkajšieho zvukovodu. Najmä po intenzívnom kontakte s vodou je preto odstránenie vlhkosti dôležitým opatrením k zabráneniu zápalov. Unikátne zloženie NORMISON ušného spreja zaisťuje, aby sa kožný povrch vonkajšieho zvukovodu rýchlo osušil. Obsiahnuté kyslé komponenty napomáhajú rýchlej regenerácii a udržaniu prirodzene kyselého ochranného povrchu kože. Obsiahnutý dexpanthenol poskytuje koži ešte ďalšiu, špeciálnu ochranu navyč.

Oblasti použitia – kedy by ste mali použiť NORMISON ušný sprej?

- Na prevenciu zápalov vonkajšieho zvukovodu, najmä pri častejšom alebo dlhšie trvajúcim pobyte vo vode, ako napr. po plávaní, kúpaní, potápaní, vodných športoch.
- Ako podporná terapia v rámci medikamentózneho liečenia vonkajšieho zvukovodu.

Neexistujú žiadne pochybnosti týkajúce sa použitia počas tehotenstva a dojčenia.

NORMISON ušný sprej je určený na použitie u dospelých a detí od 3 rokov.

Dávkovanie a spôsob aplikácie – ako by ste mali aplikovať NORMISON ušný sprej?

Po pobyte vo vode (sladkej alebo slanej) odporúčame nastriekať do zvukovodu: u dospelých 2-3 vstreky, u detí 1-2 vstreky. Potom nakloňte hlavu na stranu a nechajte nastriekanú tekutinu v uchu pôsobiť 20-30 sekúnd. Po opätovnom narovnaní hlavy zotrite vytekajúcu tekutinu a zvyšnú tekutinu, ktorá zostala vo zvukovode nechajte vsrebať. Celý proces opakujte aj v druhom uchu.

NORMISON ušný sprej má mať pred použitím pokiaľ možno telesnú teplotu.

Pri silne stvrdnutom ušnom maze, kožných lupinách alebo iných usadeninách odporúčame pred použitím NORMISON ušného spreja najprv vyčistiť vonkajší zvukovod CERUSTOP ušným olejom.

Kedy by ste nemali NORMISON ušný sprej používať?

- Ak ste precitlivení (alergickí) na niektorú látku obsiahnutú v prípravku.
- Pri perforovanej bubienkovej blane (otvor v bubienku).

Možné vedľajšie účinky/interakcie

NORMISON ušný sprej môže pri ľahko podráždenom vonkajšom zvukovode vyvolať pocit pálenia. Skúšania interakcií s inými produktami sa nevykonali.

Informácie pre bezpečné používanie

NORMISON ušný sprej je zdravotnícka pomôcka. Pri ušných bolestiach musíte bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc!

Zvukovody nesmiete mechanicky čistiť, ani ich upchávať vatou!

NORMISON ušný sprej sa nesmie užívať vnútorne, ani striekať do očí!

Fľaštička musí byť stále uzavretá a uchovávaná mimo dosahu detí!

Veľkosť balenia: 10 ml fľaštička s rozprašovačom. 1 rozprašovacia dávka = 0,1 ml.

Doba použiteľnosti: pozri dátum expirácie uvedený na obale. Nepoužívajte dlhšie ako 8 týždňov po prvom otvorení.

Pokyny na skladovanie: Neskladujte pri teplote vyššej ako 25 °C. Chráňte pred svetlom.

Výrobca: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystasse 129, 1200 Viedeň, Rakúsko



Distribútor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Viedeň, Rakúsko

Distribútor v Slovenskej republike: Agency MM Health SK s.r.o., Sokolská 38, 900 89 Častá

Stav informácií: marec 2021

Použité symboly:

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie!

Výrobca

Šarža

Spotrebujte pred

25°C

Neskladujte pri teplote vyššej ako 25 °C

Chráňte pred svetlom

SI

Artikel: Normison Ohrenspray	Art.Nr.: NORS-CS10-BP-02
Farbe 1: Schwarz	Farbe 2:
Farbe 3:	Farbe 4:
Maß: size: 140x420 mm	Datum: date: 30.01.2024
Nochmalige Vorlage new proof	<input type="checkbox"/>
Nach Korrektur Druckreif good for printing after correction	<input type="checkbox"/>
Druckreif good for printing	<input type="checkbox"/>